

Anleitung zur Anwendung der Selbsttests

1. Fülle den Zettel aus und bringe ihn zum Lehrertisch!
2. Extraktionsröhrchen in den Röhrchenständer der Verpackung drücken.
3. Öffne die Extraktionslösung.

VORSICHT: Vom Gesicht weg öffnen / nichts verschütten!



4. Drücken den gesamten Inhalt der Lösung in das Röhrchen.

VORSICHT: Die Behälter dürfen sich nicht berühren / nicht umfallen!



5. Nimm die versiegelte Verpackung. Auf einer Seite ist eine weiche, textile Spitze. Die darfst du **nicht** berühren!



6. **Ziehe die Tupferverpackung auf und nimm den Tupfer vorsichtig heraus.**


VORSICHT: Denke daran, die weiche, textile Seite **Nicht** zu berühren!

7. Führe den Tupfer vorsichtig in ein Nasenloch ein – maximal 2,5 cm tief! Drehe den Tupfer 3 - 4 mal in der Nase! Warte einige Sekunden!

Wiederhole dasselbe im anderen Nasenloch!


VORSICHT: Das kann sich unangenehm anfühlen.

Führe den Tupfer nicht tiefer ein, und stoppe, wenn es weh tut oder du einen starken Widerstand spürst.

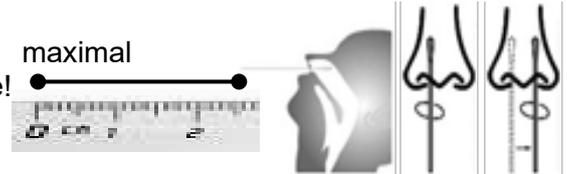

8. Stecke den Tupfer mit der Probe in das Extraktionsröhrchen ein. Drehe den Tupfer drei bis fünf (3 - 5) mal. **Warte 1 Minute!**

9. Drücke das Röhrchen mit den Fingern zusammen und entferne danach so gut wie möglich die Lösung vom Tupfer, während du den Tupfer herausziehst und auf ein Einwegtuch zum Entsorgen legst.

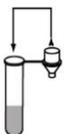


10. Setze die Abdeckkappe mit Tropfaufsatz auf das Röhrchen.

11. **Informiere den Lehrer, dass du mit deinen Vorbereitungen fertig bist, damit er die Uhrzeit notieren kann!**

12. Öffne den Beutel und lege die Testkassette auf den Tisch!

13. Drehe das Röhrchen um und gib 3 Tropfen in die Probenvertiefung (S). Drücke dafür das Röhrchen leicht zusammen.

VORSICHT: Vermeide die Bildung von Luftblasen!

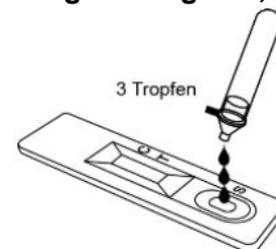

14. Bringe die Testkassette zum Lehrertisch, desinfiziere deinen Tisch und entsorge **alle** Materialien von deinem Tisch!

Danke für deine Mitarbeit. Du kannst jetzt zurück in den Unterricht!